


¡Nuevas Mejoras!

# Oasis™

Drenaje Torácico con **Succión en Seco**

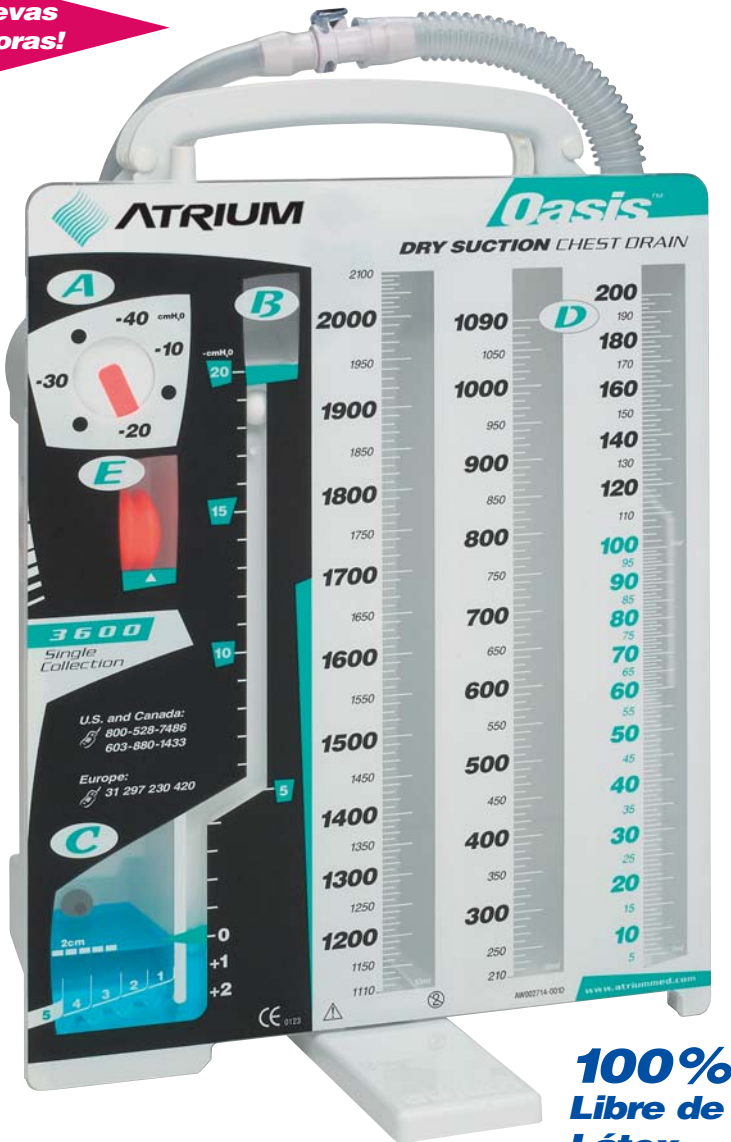

## Instalación

- Paso 1. Llenar la cámara del sello de agua hasta la marca de 2cm.** – Introducir 45ml de agua o solución salina estéril a través del orificio de aspiración situado en la parte superior del drenaje torácico. Para los modelos suministrados con líquido estéril, romper la tapa del envase de plástico e insertar la punta en el orificio de aspiración. Presionar el envase para vaciar el contenido dentro de la cámara del sello de agua.
- Paso 2. Conectar el tubo del paciente al paciente** - Conectar el drenaje torácico al paciente antes de iniciar la aspiración.
- Paso 3. Conectar la fuente de aspiración al drenaje torácico** – Conecte la línea de aspiración al conector de succión ubicado en la parte superior izquierda del drenaje.
- Paso 4. Activar la fuente de aspiración** – Aumentar el vacío en la fuente de aspiración a -80mmHg o superior. El regulador de aspiración está preestablecido en -20cmH2O. Ajustar según se requiera.

- **Agua Pre-ensada\*** – verdadera innovación. Ubicado en el panel posterior del drenaje, el envase de 45ml contiene la cantidad exacta para llenar la cámara del sello de agua hasta la marca de 2cm.
- **Protección Mejorada ante Derribos Accidentales** – Ante un derribo accidental, el nuevo “embudo anti-derribos” permite recuperar todo el líquido en la cámara del sello de agua cuando el drenaje vuelve a la posición vertical.

\*Patente Pendiente

- **Monitor Graduado de Fugas de Aire** – el burbujeo de la fuga de aire puede medirse en un rango del 1 (bajo) al 5 (alto). Las burbujas de aire crean un patrón de fácil seguimiento para monitorizar las tendencias de la fuga.
- **Nueva Asa más Grande y Nuevos Ganchos Flexibles** – La nueva asa más grande, de fácil manejo, facilita el transporte. Para su adecuación a los nuevos modelos de cama, los ganchos flexibles (ubicados dentro del asa) permiten colgar el drenaje en el riel de la cama con un punto de apoyo único.



Distribuido en México por  
Grupo Moravi, S.A. de C.V.

[www.grupomoravi.com](http://www.grupomoravi.com)

[ventas@grupomoravi.com](mailto:ventas@grupomoravi.com)



© Atrium Medical Corporation 2003. All rights reserved.  
Atrium and Oasis are trademarks of Atrium Medical Corporation.  
Part #003014 - A4.